

Implantate fürs Leben

Tägliche Pflege für die Einzelzahnversorgung und die implantatgetragene Brücke



Dentsply
Sirona

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Mit dem Erhalt von implantatgetragendem Zahnersatz gewinnen Sie die ästhetischen und funktionellen Eigenschaften zurück, die Sie von Ihren natürlichen Zähnen her kennen. Wie natürliche Zähne auch, benötigen implantatgetragene Zahnkronen oder Brücken eine regelmäßige Pflege, um ein gesundes Gewebemilieu zu gewährleisten.

Die richtige Pflege ist der Schlüssel zu einer sicheren und strahlenden Zukunft Ihrer Zähne. Putzen Sie Ihren Zahnersatz so, wie Sie Ihre natürlichen Zähne putzen würden, ober- und unterhalb des Zahnfleischrands. Verwenden Sie dabei am besten eine weiche Zahnbürste.

Benutzen Sie eine Zahncreme mit sanften Putzkörpern.

Ihr Zahnersatz muss jeden Tag gründlich gereinigt werden, wenn Sie viele Jahre Freude daran haben möchten. Es empfiehlt sich daher, bei der Reinigung des Mundinnenraums auf eine gewisse Routine zu achten, um sicherzustellen, dass alle Oberflächen gereinigt werden.

EINZELZAHNVERSORGUNG

Wichtige zu reinigende Bereiche

- Implantatgetragene Zahnkrone, ober- und unterhalb des Zahnfleischrands
- Zahnzwischenräume



1. Zahnbürste



2. Winkelbürste mit
Borstenbündel



3. Interdentalebürste
(Zwischenraumbürste)



4. Zahnseide

SCHRITTWEISE ANLEITUNG

1. Zahnbürste

Eventuell ist es nötig, für schlecht erreichbare Bereiche eine andere Zahnbürste zu verwenden als die Bürste zur normalen Reinigung der Zähne. Eine elektrische Zahnbürste ist eine gute Alternative und leicht zu handhaben.

2. Winkelbürste mit Borstenbündel

Eine gewinkelte Einbüschelbürste ist für schwer erreichbare Bereiche rund um Ihre implantatgetragenen Zahnkronen oder Brückenglieder gut geeignet.

3. Interdentalbürste (Zwischenraumbürste)

Interdentalbürsten eignen sich zur Reinigung aller Zwischenräume zwischen Zähnen und implantatgetragenen Zahnkronen sowie der kleinen Spalten unterhalb von Brückengliedern. Führen Sie die Bürste in einer Vorwärts-Rückwärts-Bewegung. Die Interdentalbürsten sind üblicherweise mit einem kunststoffummantelten Draht ausgestattet und in unterschiedlichen Größen erhältlich. Fragen Sie ggfs. Ihren Zahnarzt um Rat. HINWEIS: Benutzen Sie keine Zahnpasta für die Zwischenraumreinigung.

4. Zahnseide

Für enge Zwischenräume, in denen die Interdentalbürste schwer einsetzbar ist, wird Zahnseide empfohlen. Reinigen Sie die Seiten Ihres implantatgetragenen Zahnersatzes, indem Sie einen dickeren Faden Zahnseide zwischen den implantatgetragenen Zahnkronen und deren Nachbarzähnen vor und zurück, sowie an der Zahnkrone herauf- und herunterziehen. Reinigen Sie die Brücke am Übergang zum Zahnfleisch mit einer seitlichen Bewegung.

IMPLANTATGETRAGENE BRÜCKE

Wichtige zu reinigende Bereiche

- Entlang der Implantataufbauten, die oberhalb des Zahnfleischs liegen und an denen die Brücke befestigt ist
- Unterhalb der Brücke



1. Zahnbürste



2. Winkelbürste mit
Borstenbündel



3. Interdentälbürste
(Zwischenraumbürste)



4. Zahnseide



FOLGETERMINE

Ihr neuer Zahnersatz erfordert die gleiche Pflege wie natürliche Zähne. Dies schließt regelmäßige Untersuchungen bei einem Zahnarzt ein.

Bei diesen Besuchen werden Sie und Ihr Zahnarzt bzw. Ihre Zahnarthelferin alle nötigen Maßnahmen zur Pflege und dauerhaften Hygiene des Zahnersatzes besprechen.

Zahnarzt oder Helferin werden Ihnen vorschlagen, in welchen Abständen Sie Termine für künftige Kontrolluntersuchungen einplanen sollten.


Persönliche Anmerkungen/nächster Termin:

Ihr Zahnarzt:


Adresse:

Telefon:

Platzierung Ihrer Implantate
X = Implantatplatzierung

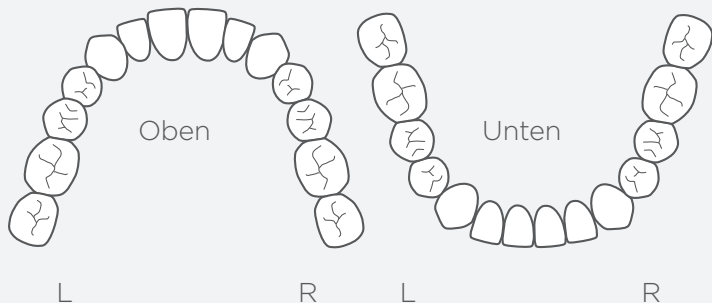

Mit dem Erhalt von implantatgetragendem Zahnersatz gewinnen Sie die ästhetischen und funktionellen Eigenschaften zurück, die Sie von Ihren natürlichen Zähnen her kennen. Wie natürliche Zähne auch, benötigen implantatgetragene Zahnkronen oder Brücken eine regelmäßige Pflege, um ein gesundes Gewebemilieu zu gewährleisten.

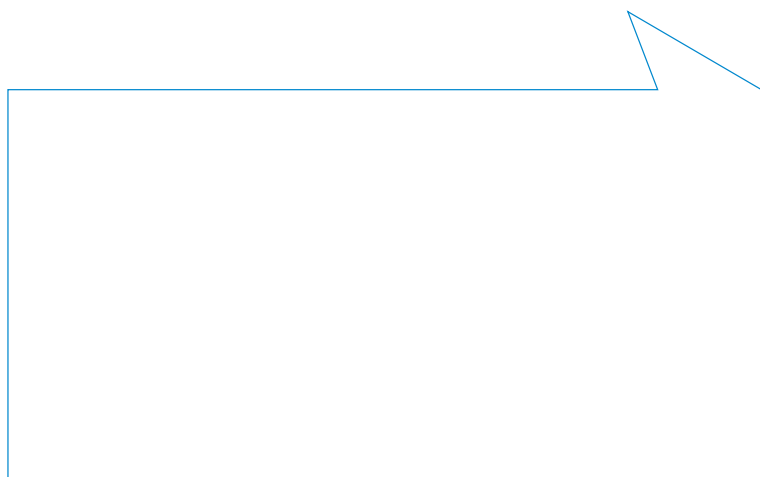

Erfahren Sie mehr über Zahnimplantate unter
www.implantatefuersleben.de